

دستور العمل استفاده از Safety box

- 1- اشیاء تیز و برنده (نیدل بدون سرپوش - سوزن آنژیوکت - تیغ بیستوری) را در آن بریزد.
- 2- ویالهای شفاف که دیواره نازک و شکننده دارند (آمپولهای دارویی) و حتی شیشه شکسته شده در بخش در داخل Safety box ریخته شوند.
- 3- از انداختن ویال دارویی مقاوم به ضربه (ویال پنی سیلین و....) کاغذ، پنبه آغشته به خون، باند، گاز و در درون Safety box خودداری شود.
- 4- تعویض سطلهای Safety box بعد از پر شدن 3/4 سطل می بایستی انجام شود.
- 5- درب سطل کاملاً محکم و fix باشد.
- 6- در صورت امکان از ثبت تاریخ روی Safety box خودداری شود.
- 7- بعد از بسته شدن در Safety box، خدمات بخش موظف است سطل را درون کیسه پلاستیک زرد رنگ گذاشته و با چسباندن برچسب مخصوص به محل موقت زباله های عفونی انتقال دهد.



واحد کنترل عفونت - بهداشت محیط