

راهنمای پاکسازی و گندزدایی وسایل در بیمارستان شهید رجایی

نوع محلول مورد استفاده و روش های گندزدایی و استریلیزاسیون	روش پاکسازی	تواتر شستشو	ابزار و تجهیزات	تقسیم بندی وسایل
ابتدا گندزدایی سطح متوسط (Intermediate Level Disinfectant) و سپس استریل کردن به وسیله اتوکلاو (برای ابزار مقاوم به حرارت) و پلاسما (برای ابزار حساس به حرارت)	1- شستشو به وسیله برس با آب و ماده دترجنت 2- آبکشی و خشک کردن 3- غوطه ورسازی در محلول گندزدای سطح متوسط در مدت زمان توصیه شده 4- خارج کردن قطعات از محلول موردنظر 5- آبکشی و خشک کردن 6- بسته بندی 7- قراردادن در اتوکلاو	بعد از هر بار استفاده	کلیه وسایلی که وارد سیستم جریان خون، نسوج و یا بافت بدن انسان می شوند. (ست های جراحی- ست های سوچر- ست های بخش ها و سایر موارد مشابه)	وسایل بحرانی (Critical devices)
گندزدایی سطح بالا (High Level Disinfectant)	1- شستشو به وسیله برس با آب و ماده دترجنت 2- آبکشی و خشک کردن 3- غوطه ورسازی در محلول گندزدای سطح بالا بر پایه آلدئیدها در مدت زمان توصیه شده 4- خارج کردن قطعات از محلول موردنظر 5- آبکشی و نگهداری به صورت خشک.	بعد از هر بار استفاده	وسایلی که در تماس با غشاهای موکوسی و پوست سالم هستند، و یا ممکن است سبب آسیب یا زخم آنها شوند. (آمبوپگ- ماسک دستگاه بیهوشی- تیغه لارنگوسکوپ- کاف BP- قیچی بیمار و سایر موارد مشابه)	وسایل نیمه بحرانی (Semicritical devices)
گندزدایی سطح پایین (Low Level Disinfectant)	1- شستشو با آب و محلول پاک کننده 2- خشک کردن 3- گندزدایی با محلول گندزدای سطح پایین	بعد از هر بار استفاده و یا به تواتر منظم	وسایلی که تماس با پوست سالم داشته و با غشاهای مخاطی تماس ندارند و یا اصلا تماسی با بافت ندارند. (ساکشن- ونتیلاتور- دسته لارنگوسکوپ- سرنگ پمپ مانیفور- سیم های مانیتور- ترالی E.box- ترالی پانسمان و دارو- دستگاه d.c shock - فلومتر اکسیژن(محفظه آب)- گیج اکسیژن- پروپ پالس اکسی متر- پایه سرم- تشک، کمد، میز و تخت بیمار- قفسه های نگهداری پک استریل- میز پکینگ- پروپ های سونو و فیزیوتراپی- کمد دارویی- کمد سرم- یخچال- سرویس بهداشتی- و سایر موارد مشابه)	وسایل غیر بحرانی (Noncritical devices)

راهنمای پاکسازی و گندزدایی وسایل در بیمارستان شهید رجایی

واحد بهداشت محیط